

## Gynauxil

### Wyrób Medyczny.

### Globulki dopochwowe.

**Gynauxil** globulki dopochwowe to wyrób medyczny w postaci zestalonej emulsji olejowo-wodnej, zawierający składniki sprzyjające adhezji do błony śluzowej pochwy. Właściwości mukoadhezyjne globulek **Gynauxil** sprzyjają budowie bariery na błonie śluzowej pochwy, która pomaga w zachowaniu prawidłowego stanu dróg rodnych i okolic intymnych: odpowiedniego nawilżenia i odżywienia nabłonka, pobudza także rozwój naturalnej flory bakteryjnej. Globulki umieszczone są w oddzielnych gniazdach blistra oddzielonych perforacją.



### Przeciwwskazania i ostrzeżenia:

Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników preparatu.

W razie wątpliwości należy konsultować stosowanie z lekarzem ginekologiem.

Nie stosować w trakcie menstruacji.

Po założeniu globulki nie podejmować współżycia płciowego.

Nie stosować globulek **Gynauxil** w leczeniu zakażeń narządów rodnych i stanów zapalnych.

U osób podatnych na uczulenia zachować szczególną ostrożność.

Jeśli po zastosowaniu produktu pojawił się wyprysk, obrzęk, świąd bądź inne, nie występujące wcześniej dolegliwości w okolicy sromu, należy przerwać stosowanie i zwrócić się do lekarza.

Nie stosować produktu łącznie z innymi preparatami podawanymi dopochwowo.

Nie wykonywano badań zgodności produktu z materiałami antykoncepcji mechanicznej, takimi jak krążki, diafragmy czy wkładki domaciczne (lateks, poliuretan), dlatego nie zaleca się stosowania globulek **Gynauxil** równocześnie z tymi środkami.

Kobiety w ciąży i matki karmiące mogą stosować produkt wyłącznie po konsultacji z lekarzem ginekologiem.

Nie używać jeśli uszkodzone jest opakowanie bezpośrednie.

Nie stosować w przypadku uszkodzonej błony śluzowej pochwy.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

**Przewidziane zastosowanie:** Przywracanie lub utrzymanie właściwego pH, co stwarza warunki hamowania infekcji bakteryjnych i grzybiczych. Łagodzenie objawów związanych z odczuciem suchości w pochwie, w tym wywołanej niedoborem estrogenów. Wzmacnianie naturalnej flory bakteryjnej pochwy np. po antybiotykoterapii, porodzie, menstruacji w okresie zaburzonej gospodarki hormonalnej oraz w przypadku stwierdzonej niskiej liczby bakterii kwasu mlekowego w badaniu pochwy. Przeciwdziałanie stanom atrofii (zaniku) błony śluzowej pochwy. Producent i podmiot prowadzący reklamę "POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA" Sp. z o.o.

To jest wyrób medyczny.  
Używaj go zgodnie z instrukcją  
używania lub etykietą.

### **Skład:**

Składniki: glukoza, ekstrakt drożdżowy, hialuronian sodu, kwas mlekowy, octan sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, siarczan magnezu, siarczan manganu, podłoże tłuszczowe: trójglicerydy kwasów tłuszczowych, woda, monooleinian polioksyetylenosorbitolu, etoksylogowany alkohol cetostearylowy, monogliceryd kwasu rycynolowego.

To jest wyrób medyczny.  
Używaj go zgodnie z instrukcją  
używania lub etykietą.

### **Sposób użycia:**

Globulkę należy umieścić głęboko w pochwie.

Kobiety miesiączkujące / w okresie rozrodczym: Zakładać dzień po dniu po 1 globulce przez pięć kolejnych dni, począwszy od 1-go dnia po zakończeniu menstruacji. Kontynuować w ten sposób stosowanie przez 2 do 3 następujących po sobie cyklach menstruacyjnych lub do czasu uzyskania poprawy. Lekarz może zalecić odmienny sposób użycia, do którego należy się dostosować.

**Przewidziane zastosowanie:** Przywracanie lub utrzymanie właściwego pH, co stwarza warunki hamowania infekcji bakteryjnych i grzybiczych. Łagodzenie objawów związanych z odczuciem suchości w pochwie, w tym wywołanej niedoborem estrogenów. Wzmacnianie naturalnej flory bakteryjnej pochwy np. po antybiotykoterapii, porodzie, menstruacji w okresie zaburzonej gospodarki hormonalnej oraz w przypadku stwierdzonej niskiej liczby bakterii kwasu mlekowego w badaniu pochwy. Przeciwdziałanie stanom atrofii (zaniku) błony śluzowej pochwy. Producent i podmiot prowadzący reklamę "POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA" Sp. z o.o.

Kobiety w okresie menopauzy i po menopauzie: Zakładać dzień po dniu po 1 globulce przez 10 kolejnych dni lub według wskazań lekarza. Zrobić około 2-tygodniową przerwę, po której można wznowić stosowanie. Jeśli pojawi się miesiączka, stosowanie należy przerwać i wznowić po zakończeniu menstruacji.

Globulkę najlepiej zakładać na noc.

W celu wydobycia globulki należy oderwać gniazdo wzdłuż perforacji, następnie rozchylić i rozciągnąć listki gniazda. Globulkę założyć zaraz po wyjęciu z gniazda.

Możliwe beżowe zabarwienie globulki jest związane z obecnością ekstraktu drożdżowego oraz glukozy i nie wpływa na jakość produktu.

To jest wyrób medyczny.  
Używaj go zgodnie z instrukcją  
używania lub etykietą.

## Opakowanie:

- 10 globulek dopochwowych

**Przewidziane zastosowanie:** Przywracanie lub utrzymanie właściwego pH, co stwarza warunki hamowania infekcji bakteryjnych i grzybiczych. Łagodzenie objawów związanych z odczuciem suchości w pochwie, w tym wywołanej niedoborem estrogenów. Wzmacnianie naturalnej flory bakteryjnej pochwy np. po antybiotykoterapii, porodzie, menstruacji w okresie zaburzonej gospodarki hormonalnej oraz w przypadku stwierdzonej niskiej liczby bakterii kwasu mlekowego w badaniu pochwy. Przeciwdziałanie stanom atrofii (zaniku) błony śluzowej pochwy. Producent i podmiot prowadzący reklamę "POLSKI LEK – DYSTRYBUCJA" Sp. z o.o.